

## SERVICE DE TÉLÉSOINS À DOMICILE

# Procédure d'utilisation des tablettes iPad prêtées

## Table des matières

1. Réinitialiser l'application TSD pour un nouveau patient .....	2
2. Changer la langue de l'application TSD sur la tablette (au besoin) .....	3
3. Nettoyage et désinfection de la tablette .....	5

## 1. Réinitialiser l'application TSD pour un nouveau patient

Si la tablette a servi préalablement, il est essentiel de réinitialiser l'application TSD. Ceci aura pour effet de remettre la tablette dans le mode d'accueil, ce qui forcera le nouveau patient à s'authentifier avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Voici les étapes à suivre :

- 1.1. Lancer le mode d'administration en **secouant très fortement** la tablette. La fenêtre « Mode d'administration » apparaît (voir Figure 1).

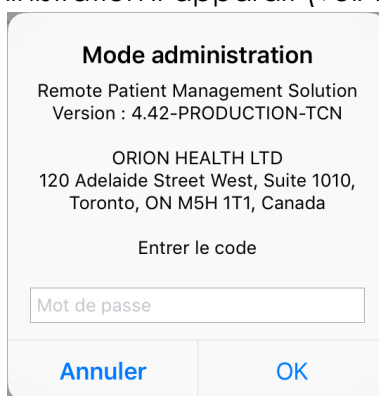


Figure 1 Mode d'administration

- 1.2. Saisir le mot de passe à 4 chiffres composé de la date du jour auquel on ajoute 10, suivi du mois auquel on ajoute 10 (**jour + 10 suivi du mois +10**). Par exemple, pour le 4 octobre (4<sup>e</sup> jour du 10<sup>e</sup> mois), le mot de passe sera 1420.
- 1.3. Appuyer sur OK. La fenêtre de réinitialisation de l'application TSD apparaît (voir Figure 2).

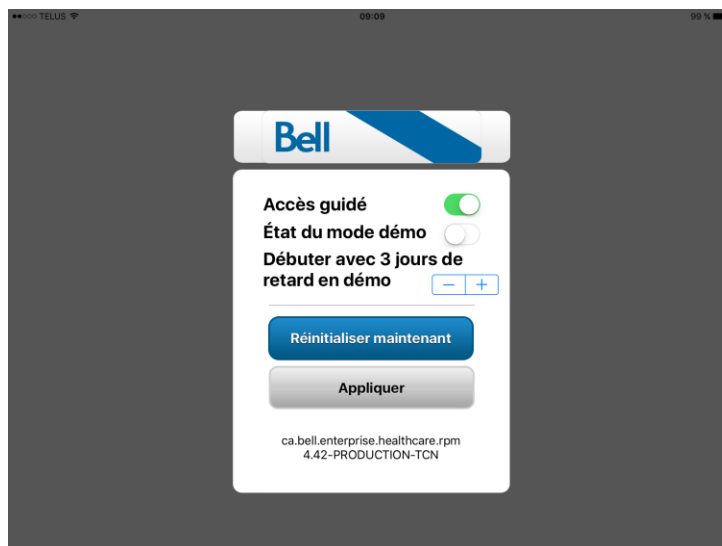


Figure 2 Réinitialisation de l'application TSD

- 1.4. Si nécessaire, appuyer sur le signe moins « - » afin de débiter l'application TSD en mode démonstration pour un ou plusieurs jours et activer le bouton « État du mode démo ». Les données saisies en mode démonstration ne seront pas comptabilisées dans le profil du patient.
- 1.5. Vérifier que le bouton « Accès guidé » est activé (en vert) comme dans la Figure 2.
- 1.6. Appuyer sur le bouton « Réinitialiser maintenant ». La fenêtre d'authentification de l'application TSD apparaît (voir Figure 3).

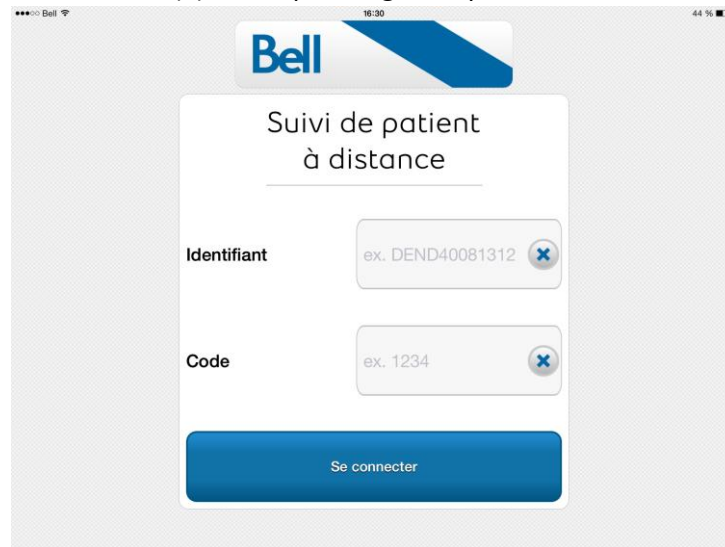


Figure 3 Fenêtre d'authentification de l'application TSD

## 2. Changer la langue de l'application TSD sur la tablette (au besoin)

**Préalable :** La tablette doit avoir un accès Internet (Wi-Fi ou cellulaire), être chargée et être dotée de la version 4.42 ou plus de l'application TSD.

Voici les étapes à suivre pour changer la langue de l'application :

- 2.1. Suivre les étapes 1.1, 1.2 et 1.3 de la procédure de réinitialisation de l'application TSD.
- 2.2. Désactiver le bouton « Accès guidé » comme dans la Figure 4.

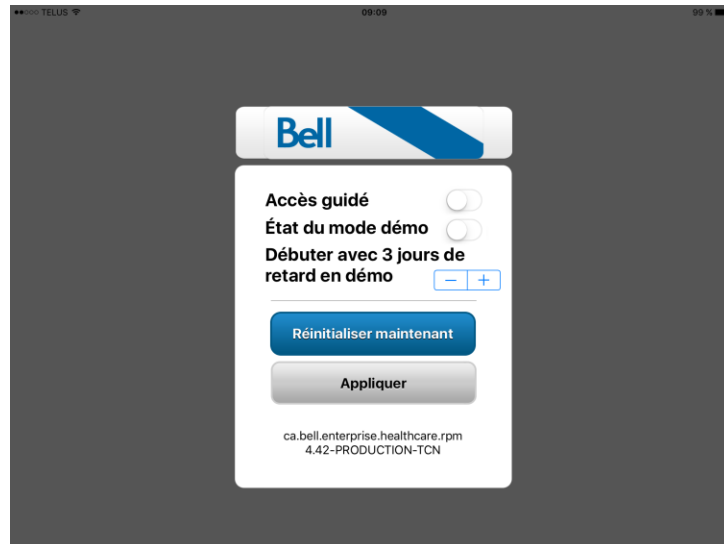



Figure 4 Déverrouillage de la tablette

- 2.3. Appuyer sur le bouton « Appliquer ». La tablette est maintenant déverrouillée.
- 2.4. Appuyer sur le bouton principal de la tablette pour sortir de l'application TSD, puis ouvrir les réglages de la tablette en cliquant sur l'icône suivant : 
- 2.5. Aller dans l'onglet « Général », puis descendre au bas de la page pour sélectionner « Langue et région » ou « Language & Region » si la tablette est en anglais (voir Figure 5).

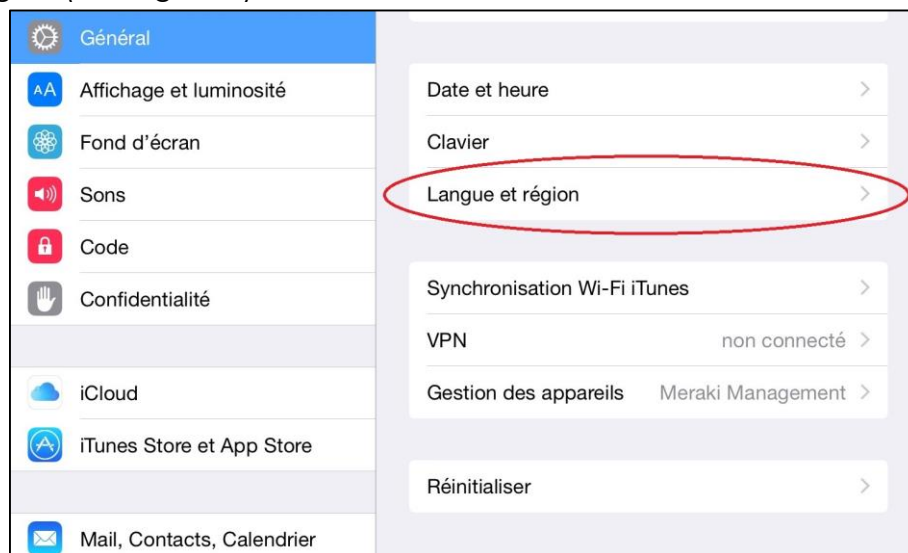



Figure 5 Fenêtre des réglages généraux de la tablette

- 2.6. Dans le menu « Langue et région », sélectionner « Langue de l'iPad » ou « iPad Language » en anglais, sélectionner la langue désirée, cliquer sur « OK », puis sur « Continuer ».
- 2.7. Retourner dans l'application TSD en cliquant sur l'icône suivant : 

- 2.8. Répéter les étapes 1.1, 1.2 et 1.3 de la procédure de réinitialisation de l'application TSD.
- 2.9. Activer le bouton « Accès guidé » comme dans la Figure 2.
- 2.10. Appuyer sur le bouton « Appliquer ».
- 2.11. Vérifier que le changement de langue a bel et bien été apporté.
- 2.12. Vérifier que la tablette est bien verrouillée. Pour ce faire, appuyer sur le bouton principal de la tablette et vérifier qu'il n'est pas possible de sortir de l'application TSD. Sinon, répéter les étapes 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10.

### 3. Nettoyage et désinfection de la tablette

Voici comment procéder au nettoyage et à la désinfection de la tablette :

- 3.1. Déconnecter tous les câbles et mettre l'iPad en veille en appuyant sur le bouton marche/veille.
- 3.2. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux. Les chiffons, les serviettes, les serviettes en papier ou tout élément abrasif similaire peuvent endommager l'appareil.
- 3.3. Pour la désinfection, vaporiser sur un linge doux la solution nettoyante et désinfectante Virox liquide. Procéder à la désinfection et laisser sécher le produit afin d'avoir le temps de contact requis (environ 5 minutes).
- 3.4. Évitez de mettre le produit en contact avec des substances liquides.
- 3.5. N'utilisez pas d'aérosol, ni de solvant ou de produit abrasif.
- 3.6. Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la tablette.**